

mylife YpsoPump Reservoir

Einfaches Nachfüllen mit dem Transferadapter

Wussten Sie schon, dass Sie Ihr mylife YpsoPump Reservoir selbst mit Insulin befüllen können? Das geht schnell, ist unkompliziert und reduziert Verpackungsmüll. Der benötigte Transferadapter liegt jeder Packung bei.



Wie funktioniert das Nachfüllen?

1. Neues Reservoir vorbereiten:

Beginnen Sie den Vorgang, indem Sie zunächst ein neues Reservoir gemäß den Schritten 1–9 der Gebrauchsanweisung, die diesem Produkt beiliegt, befüllen.

2. Adapter auf der Insulinflasche lassen:

Nach dem Befüllen entfernen Sie das Reservoir vom Transferadapter und lassen Sie den Transferadapter auf der Insulin-Durchstechflasche stecken. Jeder Adapter ist nur für einen Füll- und Nachfüllvorgang geeignet.

3. Reservoir kennzeichnen und lagern:

Schrauben Sie die Kolbenstange vom neu befüllten Reservoir ab (werfen Sie die grüne Kolbenstange nicht weg). Kennzeichnen Sie das neu befüllte Reservoir mit einem Permanentmarker (Fülldatum) und stellen Sie es in den Kühlschrank.

4. Leeres Reservoir entnehmen:

Entfernen Sie das leere Reservoir aus Ihrer Pumpe und schrauben Sie die grüne Kolbenstange in den Kolben des leeren Reservoirs.

5. Leeres Reservoir vorbereiten:

Reinigen Sie das Septum (Gummibereich) mit einem Alkoholtupfer.

6. Reservoir erneut befüllen:

Befüllen Sie das leere Reservoir mithilfe des Transferadapters entsprechend den Schritten 4, 7, 8 und 9 die in der Anleitung beschrieben sind.

7. Abschließen:

Entfernen und entsorgen Sie Kolbenstange und Adapter gemäß lokaler Abfallwirtschaft. Setzen Sie das frisch nachgefüllte Reservoir wieder in die Pumpe ein.

8. Nächstes Reservoir verwenden:

Wenn das nachgefüllte Reservoir leer ist, nutzen Sie das neu befüllte Reservoir aus dem Kühlschrank.

Haftungsausschluss - Das mylife YpsoPump Reservoir kann einmal innerhalb von 7 Tagen nach dem ersten Befüllen nachgefüllt werden. Bewahren Sie das nachgefüllte Reservoir nicht auf.

Dieses Infoblatt dient nur zur Orientierung. Maßgeblich ist immer die offizielle Gebrauchsanweisung des Herstellers. Bitte halten Sie sich an diese, um eine sichere Anwendung zu gewährleisten.